

Lumi8

INTENSE LED LIGHT FACIAL SYSTEM

La puissance de la lumière
au service du rajeunissement
cellulaire



SYBARITIC

Global Aesthetic Solutions

Anti-vieillessement, raffermisssement,
cicatrisation accéléérée du tissu cutané

WWW.BEVERDIS.CH

Lumi8

INTENSE LED LIGHT FACIAL SYSTEM

La puissance de la lumière au service du rajeunissement cellulaire

Une peau éclatante de santé, une peau plus jeune

Le Lumi 8 est un équipement médical facial utilisant la technologie des LED. Le Lumi 8 stimule ou inhibe les réponses des cellules de la peau en variant et contrôlant l'intensité des LED, leur longueur d'onde, leur pulsation, la durée d'exposition. Il aide à minimiser l'apparence des pores tout en réduisant les imperfections cutanées.

Conversion de l'énergie lumineuse en énergie cellulaire

De la même façon que les plantes utilisent la chlorophylle pour convertir l'énergie solaire en unité structurale cellulaire, les diodes électroluminescentes (LED) ont le potentiel de déclencher des réactions photochimiques intracellulaires naturelles promouvant le métabolisme associé à la production de collagène, contribuant par le fait même à la réduction des rides et à l'amélioration de l'apparence générale de la peau. L'avantage des intenses LED est que ce procédé offre une énergie lumineuse pure, sans effet thermique et donc sans problème de surchauffement de la peau.

AVANTAGES

Régénération cutanée - Stimulation de la production de collagène

Les LED jaunes (590 nm) ont deux objectifs principaux pour le rajeunissement de la peau :

- Augmenter la production du collagène et améliorer la fondation du collagène. Elles réglementent la production de l'ATP (Adénosine triphosphate) ce qui va dynamiser les cellules.
- Retarder la dégradation du collagène existant. Elles diminuent la production de la collagénase interstitielle (MMP1) induites par les rayons UV ou choc thermique.

Detox - PNIR

Les PNIR (Proprietary Near Infra Red) stimulent efficacement le système lymphatique.

- Le diamètre des vaisseaux et la circulation du système lymphatique peuvent être doublés grâce à l'utilisation de cette thérapie.
- Le diamètre des veines et des artères est également augmenté permettant une évacuation plus rapide qui aide à détoxifier et à soulager la tuméfaction.

Cicatrisation cutanée - Régénération cutanée

Les LED rouges (630 nm) stimulent la prolifération cellulaire et accélèrent la cicatrisation des tissus de deux façons :

- Optimisent le processus de cicatrisation de la phase proliférative où le nombre de fibroblastes est augmenté.
- Génèrent du collagène et augmentent la prolifération des cellules de la peau en renforçant l'action des fibroblastes.

Anti-âge, raffermissement de la peau, cicatrisation des tissus

LED Intense

La technologie LED, une solution indolore pour une nouvelle génération de soins visage à visée ANTI-AGE. La technologie LED améliore la régulation cellulaire et diminue rides et ridules par la stimulation du collagène et la reconstitution du tissu cutané. La technologie non-invasive PHOTO-ENERGIZIN, utilise la lumière qui pénètre les cellules et convertit l'énergie en énergie cellulaire. Les cellules sont ainsi stimulées, sans aucun effets secondaires ni élévation de température.

La Technologie

Il s'agit d'une combinaison synergique de processus qui stimule et / ou inhibe les réponses de cellules de la peau sans aucune lésion thermique. De la même façon que les plantes utilisent la chlorophylle pour convertir l'énergie solaire en unité structurale cellulaire, les diodes électroluminescentes (DELs) ont le potentiel de déclencher des réactions photochimiques intracellulaires naturelles promouvant le métabolisme associé à la production de collagène, contribuant par le fait même à la réduction des rides et à l'amélioration de l'apparence générale de la peau.

Une peau plus jeune, éclatante et plus saine

LED ROUGES



Traitement avec les LED rouges à 630 nm pour promouvoir la cicatrisation

LED ROUGES/JAUNES



Traitement combiné avec les LED rouges et jaunes pour promouvoir à la fois la réjuvenation et la cicatrisation

LED JAUNES



Traitement avec les LED jaunes pour promouvoir la réjuvenation

Power Wave Cycle

Les doses standards d'exposition à la lumière perdent leur efficacité au fil des expositions répétées. Lumi 8 surmonte cette bio-résistance en fournissant des variations programmées de la pulsation des cycles. Le « Power Wave Cycle » régule la variation de la puissance entre les pulsations afin d'obtenir des codes spécifiques pour une meilleure absorption d'énergie.

Lumi8

INTENSE LED LIGHT FACIAL SYSTEM



Opportunités de soins

- **Lumi 8** permet des soins visages et corps non invasifs
- **Lumi 8** est un équipement qui traite votre patient en une séance « main libre »
- **Lumi 8** dispose d'un panneau LED enveloppant pour une plus grande uniformité de traitement.
- **Lumi 8** maximise les résultats d'autres procédures (LPI, peeling, etc.)
- **Lumi 8** s'utilise pour tous les types de peau sans effet secondaire
- **Lumi 8** est facile d'utilisation et d'entretien.

Données Techniques

Super Intense SI LED	1.334 LED – 30 mA (627 LED rouges, 627 LED jaunes, 80 NIR)
Longueur d'onde	Jaune 590 nm +/- 4 nm, Rouge 630 nm +/- 3 nm, propriétaire NIR
Energie	Variable, Max 126,66 Joules / cm ²
Fréquence d'impulsion	Jusque 100 Hz
Intensité	Variable à 100%
Onde de puissance	1 s – 30 s
Temps de traitement	1 min – 30 min
Surface des LED	775 cm ²
Programmes	8 préprogrammés
Refroidissement	2 ventilateurs visage
Display LCD	Ecran « Touch screen »
Langues	9 (anglais, espagnol, russe, français, japonais, allemand, chinois, coréen, arabe)
Mobilité	Portable avec un bras multi-position
Electricité	110V / 220V 50-60 Hz 12V/8A



Contact Information

BEVERLEY DISTRIBUTION SUISSE
Beverley's Place Sàrl
Rue langallerie, 9
1003 LAUSANNE
Tél: +41 78 710 67 89
Email : info@beverdis.ch
Web: www.beverdis.ch
Shop: eshop.beverdis.ch



Données & Opportunités